

Catálogo: K139-1

ÁCIDO ÚRICO MONOREAGENTE

Nº de Testes: 100

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K139-1.0

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	5
BRANCO DO REAGENTE	SIM
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	505
TEMPERATURA	37
UNIDADE	mg/dL
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	1
PADRÃO 1	+6,0
FATOR DE CALIBRAÇÃO	---
N. DE REPLICATAS	2
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	1
LIM LIN MIN	0
LIM LIN MAX	+20,0
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 6,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.