

Catálogo: K040-1

ALBUMINA MONOREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K040-1**

Reagente Nº1 – Reagente de Cor – 1 x 250 mL

Reagente Nº2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	5
BRANCO DO REAGENTE	SIM
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	630
TEMPERATURA	37
UNIDADE	g/dL
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	1
PADRÃO 1	+3,80
FATOR DE CALIBRAÇÃO	---
N. DE REPLICATAS	2
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	2
LIM LIN MIN	0,0
LIM LIN MAX	+6,0
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 3,8 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.