

Catálogo: K046-1

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 60

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

MODO	CINÉTICO
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	30
INTERVALO CINÉTICO	60
NÚMERO DE INTERVALOS	3
DESVIO LINEARIDADE	1
BRANCO DO REAGENTE	NÃO
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	405
TEMPERATURA	37
UNIDADE	U/L
VOLUME ASPIRADO	500
NÚMERO DE PADRÕES	0
PADRÃO 1	---
FATOR DE CALIBRAÇÃO	3954
N. DE REPLICATAS	---
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	1
LIM LIN MIN	0
LIM LIN MAX	+2000
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.