

Catálogo: K108-1

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 25

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K108-1**

Reagente N°1 – Reagente de Cor – 1 x 25 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Reagente N°3 – Controle – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	5s
BRANCO DO REAGENTE	SIM
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	620
TEMPERATURA	37
UNIDADE	mg/dL
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	1
PADRÃO 1	65 mg/dL
N. DE REPLICATAS	2
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	2
LIM LIN MIN	+1,7 mg/dL
LIM LIN MAX	+100 mg/dL
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente N° 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.