

Catálogo: K025

LIPASE

Nº de Testes: 20

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

## APRESENTAÇÃO

### K025

Reagente N°1 – Tampão – 1 x 40 mL

Reagente N°2 – Inibidor Enzimático – 1 x 1 mL

Reagente N°3 – Reagente de Cor – 1 x 4 mL

Reagente N°4 – Substrato – 1 x 2 mL

Reagente N°5 – Acetona – 1 x 80 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	DIFERENCIAL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	5s
BRANCO DO REAGENTE	NÃO
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	405
TEMPERATURA	37
UNIDADE	U/L
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	0
FATOR DE CALIBRAÇÃO	<u>143</u>
N. DE REPLICATAS	-
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	1
LIM LIN MIN	1,1
LIM LIN MAX	300
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.