

Catálogo: K117-1

TRIGLICÉRIDES MONOREAGENTE

Nº de Testes: 100

Versão: 02/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K117-1**

Reagente N°1 – Reagente Enzimático – 1 x 100 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

MODO	PONTO FINAL
TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO	5
BRANCO DO REAGENTE	SIM
VALIDADE DO BRANCO	---
FILTRO PRIMÁRIO	505
TEMPERATURA	37
UNIDADE	mg/dL
VOLUME ASPIRADO	700
NÚMERO DE PADRÕES	1
PADRÃO 1	100,0
FATOR DE CALIBRAÇÃO	---
N. DE REPLICATAS	2
MODELO DE CALIBRAÇÃO	LIN
DECIMAS	1
LIM LIN MIN	+2,6
LIM LIN MAX	+900,0
CONTROLE DE QUALIDADE	0
INCLINAÇÃO	+1,000
INTERSEÇÃO	+0,000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 100,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.