

Catálogo: K025	LIPASE	Nº de Testes: 20	Versão: 12/07/2018
-----------------------	---------------	-------------------------	---------------------------

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO

K025

- Reagente N°1 – Tampão – 1 x 40 mL
- Reagente N°2 – Inibidor Enzimático – 1 x 1 mL
- Reagente N°3 – Reagente de Cor – 1 x 4 mL
- Reagente N°4 – Substrato – 1 x 2 mL
- Reagente N°5 – Acetona – 1 x 80 mL

Os reagentes são prontos para uso.

ITEM NAME	LIPASE
METHOD	END POINT
UNIT	U/L
TEMPERATURE	37°C
WAVELENGTH	405
SUB WAVELENGTH	-
BLANK	REAGENT (H ₂ O)
FACTOR	143
NORMS HIGH	15.0
NORMS LOW	2.0
DELAY TIME	03
TEST TIME	-
DECIMAL DIGITS	2
ASPIRATE VOLUME (µL)	500

STANDARD TEST PARAMETERS	
METHOD	-
NUM. OF STD.	-
NUM REPEAT	-
CONCENTRATION	-

CONTROL TEST PARAMETERS	
CONTROL NUMBER	#
AVERAGE VALUE	#
SD	#
BATCH NUMBER	0000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.