

Catálogo: K031-1

**PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 250

Versão: 12/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K031-1**

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

ITEM NAME	PROT TOTAIS
METHOD	END POINT
UNIT	g/dL
TEMPERATURE	37°C
WAVELENGTH	546
SUB WAVELENGTH	-
BLANK	REAGENT
FACTOR	-
NORMS HIGH	8.0
NORMS LOW	6.0
DELAY TIME	03
TEST TIME	-
DECIMAL DIGITS	2
ASPIRATE VOLUME (µL)	500

STANDARD TEST PARAMETERS	
METHOD	LINEAR
NUM. OF STD.	1
NUM REPEAT	3
CONCENTRATION	4.0

CONTROL TEST PARAMETERS	
CONTROL NUMBER	#
AVERAGE VALUE	#
SD	#
BATCH NUMBER	0000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.