

Catálogo: K049-6

**TRANSAMINASE ALT (TGP) CINÉTICA**

Nº de Testes: 100

Versão: 12/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K049-6**

Reagente Nº 1 – Substrato – 2 x 40 mL

Reagente Nº 2 – Coenzima – 2 x 10 mL

**PREPARO DO REAGENTE DE TRABALHO:**

Misturar 4 partes do Reagente Nº 1 com 1 (uma) parte do Reagente Nº 2. O Reagente de Trabalho é estável 72 horas entre 15 e 30°C e 2 semanas entre 2 e 8°C.

ITEM NAME	ALT_TGP
METHOD	KINETIC
UNIT	U/L
TEMPERATURE	37°C
WAVELENGTH	340
SUB WAVELENGTH	-
BLANK	NO
FACTOR	1746
NORMS HIGH	38.0
NORMS LOW	5.0
DELAY TIME	60
TEST TIME	180
DECIMAL DIGITS	2
ASPIRATE VOLUME (µL)	500

STANDARD TEST PARAMETERS	
METHOD	-
NUM. OF STD.	-
NUM REPEAT	-
CONCENTRATION	-

CONTROL TEST PARAMETERS	
CONTROL NUMBER	#
AVERAGE VALUE	#
SD	#
BATCH NUMBER	0000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.