

Catálogo: K046-1

AMILASE CINÉTICA

Nº de Testes: 60

Versão: 12/07/2018

Cód.: 00

APRESENTAÇÃO:

K046-1

Reagente N°1 – Substrato Tamponado – 3 x 20 mL

O Reagente é pronto para uso.

TEST PARAMETER	(KINETIC)	
UNIT	U/L	
TEMPERATURE	37°C	
WAVELENGTH	405	
LINEARITY ERROR	10%	
SAMPLE VOL. (µL)	20	
REAGENT VOL. (µL)	1000	
ASPIRATE VOLUME (µL)	500	
DELAY TIME (s)	30	
TEST TIME (s)	180	
NORMS	0.0	90.0
FACTOR	3954	
NAME	AMILASE	
LINEAR RANGE	3.5	2000.0

CALIBRATION SETTING	
MODE	-
NUM. OF STD.	-
REPEAT TIMES	-
STD CONCENTRATION	-

CONTROL SETTING	
CONTROL 1	#
AVERAGE VALUE	#
MIN	#
BATCH NUMBER	0000

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.