

Catálogo: K051-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 100

Versão: 04/08/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K051-2**

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TEST PARAMETER	(END POINT)	
UNIT	mg/dL	
TEMPERATURE	37°C	
MAIN WAVELENGTH	620	
SUB WAVELENGTH	-	
BLANK	REAGENT	
REAGENT BLANK	0	
DELAY TIME (s)	03	
SAMPLE VOL. (µL)	10	
REAGENT VOL. (µL)	1000	
ASPIRATE VOLUME (µL)	500	
CALIBRATION	LINEAR	
NORMS	8.8	11.0
FACTOR	0	
NAME	CÁLCIO ARS III	
LINEAR	0.0	20.0

CALIBRATION SETTING	
MODE	LINEAR
NUM. OF STD.	1
REPEAT TIMES	1
STD CONCENTRATION	10.0

CONTROL SETTING	
CONTROL 1	#
AVERAGE VALUE	#
MIN	#
BATCH NUMBER	0000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.