

Catálogo: K031-1

**PROTEÍNAS TOTAIS MONOREAGENTE**

Nº de Testes: 250

Versão: 12/07/2018

Cód.: 00

**APRESENTAÇÃO:**

**K031-1**

Reagente N°1 – Biureto – 1 x 250 mL

Reagente N°2 – Padrão – 1 x 2 mL

Os reagentes são prontos para uso.

TEST PARAMETER	(END POINT)	
UNIT	g/dL	
TEMPERATURE	37°C	
MAIN WAVELENGTH	546	
SUB WAVELENGTH	-	
BLANK	REAGENT	
REAGENT BLANK	0	
DELAY TIME (s)	03	
SAMPLE VOL. (µL)	50	
REAGENT VOL. (µL)	2500	
ASPIRATE VOLUME (µL)	500	
CALIBRATION	LINEAR	
NORMS	6.0	8.0
FACTOR	0	
NAME	PROT TOTAIS	
LINEAR	0.0	12.0

CALIBRATION SETTING	
MODE	LINEAR
NUM. OF STD.	1
REPEAT TIMES	3
STD CONCENTRATION	4.0

CONTROL SETTING	
CONTROL 1	#
AVERAGE VALUE	#
MIN	#
BATCH NUMBER	0000

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 4,0 g/dL) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.