

Catálogo: K068-1

FÓSFORO UV

Nº de testes: 500

Versão: 07/11/2018

BA 400 - BioSystems

Observações: Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

NameFósforo UV

Short NameFÓS

Sample TypeSerum

Analysis ModeEnd Point Mono

Unitmg/dL

Decimals2

No Replicates1

Reaction TypeIncreasing

Report's Name

Reading ModeMonochromatic

Main Filter340 nm

Reference Filter-

Volumes

Sample2 µL

Vol. R1200 µL

Vol. R20 µL

Times

Reading 1:315

Reading 2:-

(S)35

-

Blank Mode

Blank TypeBlank with Reagent

Blank Replicate1

Calibration Mode

Factor

Experimental Calibrator

Use Alternative Calibrator

Calibrator Replicates1

Reference Ranges

Linearity Limit15.0

Detection Limit0.11

Min Value2.5

Max Value4.8

Calibration and Curve Values

Number of Calibrators1

N1

Concentration#

Factor-

NameBiocal - K072

Lot-

Expiration-

Calibration Curve

Increasing

Decreasing

X-Asis:

Y-Asis:

Notas: A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica Biocal – K072 para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle Biocontrol N – K073 e Biocontrol P – K074.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.