

Catálogo: K108

BIOPROT U/LCR

Nº de Testes: 83

Versão: 09/06/2020

Cód. 00

Os reagentes são prontos para uso.

Type	End Point
Zero	Blank
Unit	mg/dL
Temperature	37° C
Filling	2
Decimal	1
Needle Washing	2
Cuvette Washing	Double
Washing Mode	Fast
Wavelength	630

Calibration	Standard
Calibrator	#
Value	#
Repeat Nº	1

Sample Volum	6 µL
Reagent 1 Volum	300 µL
Reagent 2 Volum	-
Reagent 3 Volum	-
Reagent 2 Delay	-
Reagent 3 Delay	-
Dilution	-
Sample	-
Diluent	-

Incubation Time	300
Reading Time	-
Check Blank Drift	-

Max. Conc.	100
Min. Conc.	1
Max. ABS	-
Min. ABS	-
Max. Delta ABS	-
Min. Delta ABS	-
Max ABS Substr./Depl.	-
Min ABS Substr./Depl.	-
Fluctuation Rate (%)	-

Quality	-
Control 1	Biocontrol N
Control 2	Biocontrol P

Normality	Min	Max
Man	1	15
Woman	1	15

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 65,0 mg/dL) para Calibração e o uso do Reagente Nº 3 (Controle) para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens.

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.