

Catálogo: K224

FOSFATASE ALCALINA IFCC

Nº de Testes: 333

Versão: 29/10/2020

Cód.: 00

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM

TEST:	FOSFATASE ALCALINA	UNIT: U/L
WAVELENGTH.: (2 END / PRIMARY)		[700] [405]
ASSAY CODE:	[RATE A] [10] []	ASSAY POINT:[15] - [25] - [] - []
	[SERUM]	
SAMPLE VOL:	NORMAL	6
	DECREASE	3
	INCREASE	12
R1 VOLUME:	240	
R2 VOLUME:	60	
R3 VOLUME:	0	
R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0 - LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1	
DUPLICATE LIMIT:	10%	S1 ABS LIMIT: [-32000]] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	000	
EXPECTED VALUE:	27 – 100	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 – 1500	

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração. Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.