

Catálogo: K083-2

CÁLCIO ARSENAZO III

Nº de Testes: 333

Versão: 06/11/2018

Cód.: 00

K051-2

Reagente Nº 1 – Arsenazo – 2 x 50 mL

Reagente Nº 2 – Padrão – 1 x 3 mL

Os reagentes são prontos para uso.

PROGRAM

TEST:	CÁLCIO	UNIT: mg/dL
WAVELENGTH.: (2 END / PRIMARY)		[0] [660]
ASSAY CODE: [1POINT]	[5] []	ASSAY POINT: [15] - [] - [] - []
	[SERUM]	
SAMPLE VOL: NORMAL	3	
DECREASE	3	
INCREASE	6	
R1 VOLUME:	300	
R2 VOLUME:	0	
R3 VOLUME:	0	
R4 VOLUME:	0	
ABS LIMIT:	00000 – INCREASE	
PROZONE LIMIT:	0 - LOWER	
CALIB TYPE:	[LINEAR] POINT: [2] [2] [0]	
SD LIMIT:	0.1	
DUPLICATE LIMIT:	500	S1 ABS LIMIT: [-32000] [32000]
SENSITIVITY LIMIT:	0	
EXPECTED VALUE:	8.8 – 11.0	
CLASS 1 TECHNICAL RANGE:	0 - 20	

A Bioclin recomenda o uso do Reagente Nº 2 (Padrão 10,0 mg/dL) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.