

Catálogo: K221

CLORETOS MONORREAGENTE

Nº de Testes: 250

Versão: 18/08/2020

Cód.: 00

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters				Reagent Parameters			
Method No. #	Name	Cloro		R1	Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)
Print Name	Cloretos Monorreagente			R2	-	-	-
Sample Type	Serum			Diluent			
Unit	mEq/L						
Assay Type	End			Decimal Points 0			
Measuring Points				Normal Range			
Start		End					
1	14	-	15				
2	0	-	0				
Wavelength				Technical Range			
Pri	450	Sec.	<input type="checkbox"/>				
Dis.	-						
Normal							
Dilution				Conc. 1.0 - 140.0			
Rerun (High/Prozone)							
Dilution							
Rerun (Low)							
Dilution				(mAbs./10) -999999 - 999999			
Reaction							
Increase				SPT Wash Enable			
				Reagent Name			
				Stirring Speed R1 Middle R2			

A Bioclin recomenda o uso do Reagente N° 2 (Padrão 100 mEq/L) ou do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal](#) – K072 para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.