

Catálogo: K106-1

**BILIRRUBINA TOTAL AUTOMAÇÃO**

Nº de Testes: 200

Versão: 06/12/2017

Cód.: 00

Os Reagentes são prontos para uso.

Chemistry Parameters				Reagent Name	Reagent (µl)	Water (µl)		
Method No.	#	Name	BILT	R1	Tampão	200	0	
Print Name	Bilirrubina Total			R2	Reag. De Cor	50	0	
Sample Type	Serum							
Unit	mg/dL			Diluent				
Assay Type	End			Decimal Points	2			
Measuring Points	Start	End						
1	26	27						
2	55	56						
Wavelength	Pri	546	Sec.	<input type="checkbox"/>	Dis.	-		
Normal				Normal Range				
				Nº	Range Name	Min	Máx	
				1	Male-G1	0.00	0.00	
				2	Male-G2	0.00	0.00	
				3	Male-G3	0.00	0.00	
				4	Female-G1	0.00	0.00	
				Technical Range				
				Conc.	0.00	-	30.0	
				(mAbs./10)	-999999	-	999999	
				SPT Wash	Enable			
				Reagent Name				
Reaction	Increase			Stirring Speed	R1	Middle	R2	Middle

A Bioclin recomenda o uso do calibrador multiparâmetro de bioquímica [Biocal – K072](#) para Calibração.

Para avaliar a precisão e a exatidão das dosagens, recomendamos o uso dos soros controle [Biocontrol N – K073](#) e [Biocontrol P – K074](#).

Cada Laboratório Clínico deve possuir um programa interno de Controle de Qualidade.